




EASYGO REHAB STANDARD

Der EasyGo Rehab Standard ist ein durch eine Begleitperson gesteuerter Hilfsmotor für manuelle Rollstühle. Die vorrangige Aufgabe des Hilfsmotor besteht darin, das schwere Heben aus dem Rollstuhl zu übernehmen, um die Begleitperson zu entlasten. Neben der körperlichen Entlastung der Begleitperson stellen viele Nutzer nach der Anschaffung eines Hilfsmotors eine verbesserte Lebensqualität fest, da Fahrten mit dem Rollstuhl erleichtert werden und der Rollstuhlnutzer daher häufiger unterwegs sein kann.

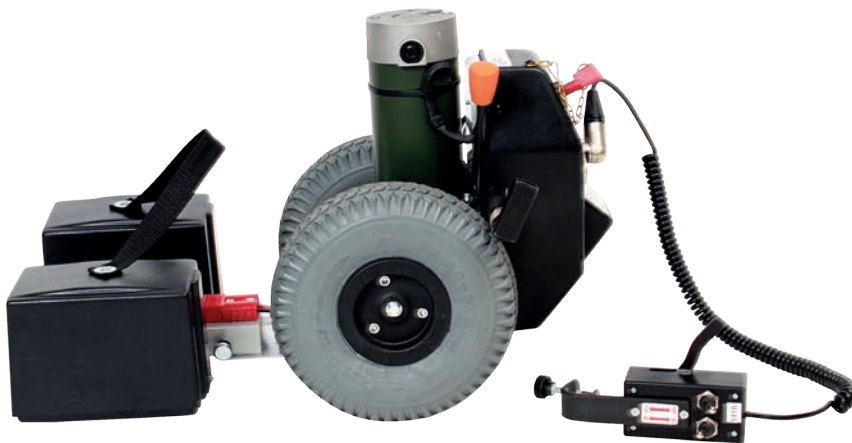

Der EasyGo Rehab Standard ist ein durch eine Begleitperson gesteuerter Hilfsmotor für manuelle Rollstühle, der eine körperlich gesunde Arbeitsumgebung für Mitarbeiter und/oder Angehörige sicherstellt.

Der EasyGo Rehab Standard übernimmt das schwere Anheben und Schieben, das mit der Handhabung von Rollstühlen verbunden ist und sorgt für optimale körperliche Bedingungen für die Begleitperson beim Bewegen manueller Rollstühle. Neben der Entlastung der Mitarbeiter und/oder Angehörigen besteht ein wichtiger Nebengewinn in der erhöhten Lebensqualität für Gehbehinderte, die häufig feststellen, dass sie nach der Anschaffung des Hilfsmotors mehr auf – kürzeren oder längeren – Touren unterwegs sind.

Die Montage des EasyGo Rehab Standards kann an den meisten Rollstühlen vorgenommen werden. Vor der Montage des Hilfsmotors am Rollstuhl wird ein Satz Beschläge direkt am Rahmen des Rollstuhls montiert. Anschließend wird die Motoreinheit des EasyGo Rehab Standard über eine Schnellkupplung angeschlossen. Dadurch entsteht die Möglichkeit, den EasyGo Rehab Standard ganz leicht an mehreren Rollstühlen verwenden zu können, indem der entsprechende Beschlag am Rahmen des aktuellen Rollstuhls befestigt wird.

gehandhabt, die am Schiebegriff des Rollstuhls montiert wird. Die Interaktionsflächen sind einfach und intuitiv, wodurch sich der EasyGo Rehab Standard leicht bedienen lässt. Fahrtrichtung und Geschwindigkeitsprogramm werden an Drucktasten ausgewählt, wonach der Speederarm zur stufenlosen Festlegung der Fahrgeschwindigkeit verwendet wird. So kann die Begleitperson die Geschwindigkeit leicht den Verhältnissen und dem eigenen Gehtempo anpassen.

Während der Handhabung des EasyGo Rehab Standard befinden sich die pannenfreien Reifen im direkten Kontakt mit dem Untergrund. So wird ein sicherer Griff des Hilfsmotors auf dem Untergrund sichergestellt. Der Hilfsmotor kann auf festem ebenem Untergrund sowie teils auf unebenem Untergrund wie Kopfsteinpflaster, unebenen Fliesen und festem Kies verwendet werden.

Soll ein Wechsel zwischen Nutzung des Hilfsmotors und manuellem Fahren möglich sein, kann der EasyGo Rehab Standard mithilfe des Fußpedals ein- und ausgeschaltet werden. Bei Betätigung des Fußpedals wird das Rad des Hilfsmotors vom Untergrund angehoben und die Handhabung erfolgt so, als wäre kein Hilfsmotor montiert. Der Hilfsmotor wird dagegen abgesenkt, wenn das Fußpedal zurückgeführt wird.

EasyGo Rehab Standard # 102395 / 101231

Maße	H: 250 mm, B: 300 mm, L: 520 mm	Motorleistung	180 W
Gewicht	19 kg	Fahrdauer je Ladevorgang	Bis zu 12 km
Batterien	12 Ah / 20 Ah	Geschwindigkeit: Schildkröte, Hase	0 - 4 km/h, 0 - 6 km/h
Ladegerät – Ladezeit	2,5 A - 5 Stunden / 8 Stunden	Steigungskapazität bei 80 kg	7°

IMMO A/S

Friis Hansens Vej 9 - DK-7100 Vejle
+45 7585 8022
hello@immodenmark.dk
immodenmark.dk





EASYGO REHAB LIGHT

Im hektischen Alltag kann das sichere Manövrieren eines manuellen Rollstuhls schwierig sein.



EasyGo Rehab Light ist ein von Begleitperson gesteuerter kleinerer Hilfsmotor, der für Rollstühle beim engen Platz entwickelt ist. Er findet seine Anwendung an Rollstühlen mit einer Sitzbreite bis zur 48 cm.

An dem Schiebegriff befestigt kann es mit dem Steuergerät den Motor an- und abgeschaltet, die Fahrtrichtung gewechselt und die Geschwindigkeit reguliert werden.

Beim Heben des Fußpedals wird der Motor abgesenkt, was das erleichterte Fahren durch den Hilfsmotor ermöglicht. Beim Fahren folgen die Reifen dem Boden, ob Pflastersteinen, schiefer Steinplatten oder festem Kies. Der Motor erhöht die Flexibilität und Mobilität des Nutzers und entlastet die Begleitperson, die von der fordernden Aufgabe des Ziehens

und Schiebens befreit wird. Muskeln und Glieder werden bei wiederholtem, schwerem Ziehen und Schieben belastet, die sich zur Berufsschäden entwickeln können. Auch das Unfallrisiko wird mit einem Motor herabgesetzt.

Der Light-Motor lässt sich problemlos ohne Werkzeug an- und abmontieren, um einfach transportiert zu werden. Zum Motor gehören unterschiedlichen Batterien, die von der Konstruktion des Rollstuhls bestimmt werden. Der Motor kann auch an neuere Starrrahmenstühle angebaut werden.

Zum Lieferumfang der EasyGo Rehab-Serie gehören pannen-sichere Reifen, Trockenbatterien und feuchtigkeitsgeschütztes Ladegerät.

EasyGo Rehab Light # 202013, HMI # 35186

Maße	H: 310 mm, B: 300 mm, L: 520 mm	Motorleistung	150 W
Gewicht	18,5 kg	Reichweite pro Batterieladung	Bis zur 10 km
Batterien	12Ah	Geschwindigkeit	0-4 km/h, 0-6 km/h
Ladegerät - Ladezeit	24V, 2,5A - 5 Stunden	Steigungskapazität beim 80 kg Last	12%, 7°

IMMO A/S

Friis Hansens Vej 9 - DK-7100 Vejle
+45 7585 8022
hello@immodenmark.dk
immodenmark.dk

IMMO  **KEEP MOVING**



EASYGO REHAB PLUS

EasyGo Rehab Plus zieht den Rollstuhl nach vorne und sichert dabei seine verlängerte Lebensdauer und ein verbessertes Arbeitsumfeld.



EasyGo Rehab Plus ist ein von der Begleitperson gesteuerter Hilfsmotor, der bequeme Umstände für breite, schwere Rollstühle und ihre bariatrischen Nutzer sichert.

EasyGo Rehab Plus ist entwickelt und hergestellt, um die Flexibilität des Nutzers zu erhöhen sowie das Arbeitsumfeld der Begleitperson zu bessern. Der Plus-Motor kann viele Rollstuhlmodelle angepasst und Rollstühle mit einem Mindestsitzmaß von 55 cm zwischen den Armlehnen gemessen anmontiert werden. Nach der Montierung kann die Begleitperson mühelos die Geschwindigkeit mithilfe des Steuergeräts einstellen.

Bei Fahren ziehen die eigenen Räder des Plus-Motors auf den Boden. Ungeachtet des Gewichts des Rollstuhlfahrers kann EasyGo Rehab Plus mithilfe des Ausgleichgetriebes scharf links oder rechts abbiegen. Der Motor kann vorteilhaft bei bariatrischen Nutzern bis zur 300 kg verwendet werden.

Der EasyGo Rehab Plus fährt mit den eigenen Rädern und sichert gute Griffbarkeit. Der Hilfsmotor trägt sein eigenes Gewicht und muss nicht in die Tragfähigkeit des Rollstuhls mitgezählt werden.

Zum Lieferumfang der EasyGo Rehab-Serie gehören pannen-sichere Reifen, Trockenbatterien und feuchtigkeitsgeschütztes Ladegerät.

EasyGo Rehab Plus # 202014, HMI # 36928

Maße	H: 300 mm, B: 500 mm, L: 240 mm	Motorleistung	300 W
Gewicht	32 kg	Reichweite pro Batterieladung	Bis zur 10 km
Batterien	20Ah	Geschwindigkeit	0-6,5 km/h
Ladegerät - Ladezeit	24V, 2,5A - 8 Stunden	Steigungskapazität beim 80 kg Last	12%, 7°

IMMO A/S

Friis Hansens Vej 9 - DK-7100 Vejle
+45 7585 8022
hello@immodenmark.dk
immodenmark.dk

IMMO  **KEEP MOVING**